



**ABIONIK**  
AIR WATER LIFE



**ABIONIK**  
AIR WATER LIFE

5 Stck. Abionik Life CPA NR

Made in Germany




# ABIONIK LIFE CPA NR

Empfehlung (EU) 2020/403  
der Europäischen Kommission vom 13. März 2020  
über Konformitätsbewertungs- und  
Marktüberwachungsverfahren im Kontext  
der COVID-19-Bedrohung


beste Filtereffizienz durch spezielle Filtermedien  
aus deutscher Produktion bei geringem Atemwiderstand  
nachhaltige Produktion, keine Weichmacher, Premium Qualität

## PARTIKELFILTRIERENDE HALBMASKE


Produkt für den medizinischen Bedarf zum Infektionsschutz

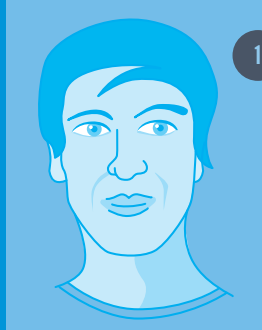

**1** Beachte, dass  
Dein Gesicht glatt  
rasiert ist. Bart-  
stoppeln, Haare  
und Schmuckac-  
cessoires können  
den dichten Sitz  
der Maske und die  
Schutzfunktion be-  
einträchtigen.

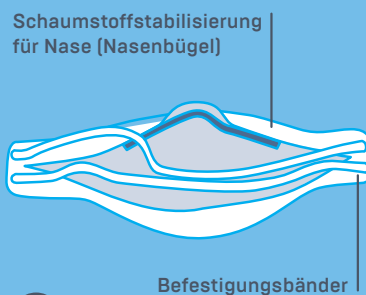

**2**

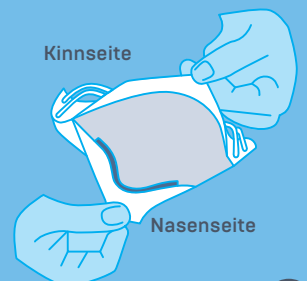

**3**

Breite die Maske mit der Innenseite nach oben vor Dir aus.  
Ziehe die Maske auseinander und setze sie anschließend vor das Gesicht.  
Beachte die richtige Zordnung von Nasen- und Kinnseite.



**4**

Greife das obere Befestigungs-  
band und ziehe es anschließend  
über den Kopf.



**5**



**6**



**7**



**8**



**9**

Die Maske sitzt nun bereits fest am Kopf. Durch das zweite Befestigungsband kann sie besser  
ausgerichtet werden, um einen optimalen Sitz und eine perfekte Abdichtung zu erzielen.  
Drücke das Nasenpolster fest und prüfe anschließend den korrekten Sitz der Maske.

## BESTÄTIGUNG

gemäß § 9 Absatz 3 der  
**Verordnung zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Produkten des medizinischen Bedarfs bei der durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursachten Epidemie (Medizinischer Bedarf Versorgungssicherstellungsverordnung – MedBVSV)**

Hiermit wird bestätigt, dass das folgende Produkt

Prüfgegenstand	Corona SARS-CoV-2 Atemschutzmaske
Modell / Type	ABIONIK LIFE CPA NR
Hersteller	Martin Systems GmbH Von-Thünen-Str. 1-4 19071 Brüsewitz

(klare Angaben zur eindeutigen Identifizierung z. B. genaue Bezeichnung, Chargennummer etc. / Foto siehe Seite 2)

nach Maßgabe des § 9 Absatz 2 MedBVSV für den begrenzten Zeitraum der derzeitigen epidemischen Lage von nationaler Tragweite, spätestens bis 31. März 2021, eingeschränkt als verkehrsfähig im Sinne des Infektionsschutzes – aufgrund des nachweislich erfolgreich durchgeführten Bewertungsverfahrens nach dem von der ZLS veröffentlichten Prüfgrundsatz - angesehen wird.

Prüfstelle	Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland e.V. Zeulenrodaer Str. 42 07973 Greiz
Berichtsnummer	Nr. 477/1/20

### Hinweise:

Dieses Produkt ist ein Produkt des medizinischen Bedarfs im Sinne des § 1 Abs. 2 der MedBVSV und dient somit ausschließlich dem Infektionsschutz.

Diese Bestätigung ist jeder Abgabeneinheit beizufügen.

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin - LAGeTSi -  
Turmstraße 21, 10559 Berlin,  
www.lagetsi.berlin.de  
Sicherheit und Gesundheit für Berlin – bei der Arbeit und danach

### Bilder:



### Ausstellungsbehörde:

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin  
Turmstraße 21, 10559 Berlin

Berlin, den 24.09.2020  
Ort, Datum

Dipl.-Ing. Andreas Westphal  
Vorname Nachname des Unterzeichners

Landesamt für Arbeitsschutz,  
Gesundheitsschutz und technische  
Sicherheit Berlin (LAGeTSi)  
Turmstraße 21 · 10559 Berlin  
Behördenstempel / Behördensiegel

# Partikelfiltrierende Halbmaske

# ABIONIK LIFE CPA NR

## Premium Qualität

### Beschreibung

Die partikelfiltrierende Halbmaske der Serie ABIONIK Life CPA NR bietet einen hervorragenden Atemschutz bei geringem Gewicht und sehr hoher Luftdurchlässigkeit.

Perfekter Sitz durch eine optimale Passform und durch die Verwendung von Materialien mit hervorragendem Rückstell- und Dehnverhalten. Die Halbmaske ist faltbar, leicht zu transportieren und zu lagern.

### Höchster Tragekomfort:

- sehr atmungsaktiv
- optimale Passform
- anschmiegsame Schaumpolsterung
- mit integriertem Nasenclip für perfekten Sitz
- komfortable Kopfbänder aus Naturgummi
- dehnbar und stabil
- geringe Beschlagneigung bei Brillenträgern
- Kinn- und Nasenlaschen zur perfekten Positionierung im Gesicht
- sehr bequem auch bei längerer Nutzung

### verwendete Materialien

Kopfbänder	Naturgummi
Klammern	Stahl
Schaumstoffpolsterung	Polyethylen
Nasenbügel	Clipband
Atemschutz	PP Vlies (Meltblown)

Die partikelfiltrierende Halbmaske **ABIONIK LIFE CPA NR** der MARTIN Systems GmbH, Friedrichstr. 95, 10117 Berlin erfüllt die Anforderungen und das Prüfverfahren für Corona SARS-Cov-2-Virus Pandemie Schutzmasken, gemäß der Empfehlung der Europäischen Kommission (EU) 2020/403 vom 13. März 2020 über Konformitätsbewertungs- und Marktüberwachungsverfahren im Kontext der COVID-19-Bedrohung.

Beste Filtereffizienz durch spezielle Filtermedien aus deutscher Produktion bei geringem Atemwiderstand

Nachhaltige Produktion,  
keine Weichmacher

## Maskengestaltung

Nutze die Maske für Deine individuelle Werbebotschaft. Die **ABIONIK Life CPA NR** kann mit einem Logo oder einer Werbebotschaft bedruckt werden.

